

電源レスで屋外への設置が容易に!


特許  
取得済

# 電源レス屋外型AED 収納ボックス AED300KZ / AED300KBZ

扉を開けると警報が鳴ります



# AED

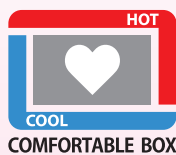

電源レス屋外型温度管理ボックス

**あきらめていた場所への  
設置が可能に!**

● 電源不要でAEDを高温低温から守る!

どんな  
構造?

気密断熱構造により外気温が  
ボックス内部に伝わりにくい。

※夏は夜の涼しさをキープし冬は昼の暖かさをキープする  
※二重構造ボックスにより真夏の直射日光の影響を受けにくい

どんな  
効果?

真夏の直射日光に晒されても安心。  
真冬の寒さにも耐えます。

※低温時の保管性能は日中の気温や日射量により変動します。

どんな  
性能?

防水防塵性能はIP44級をクリアの  
安心設計。

どんな  
メリット?

配線工事不要!固定工事のみで  
設置が完了します。



電源レス  
壁掛式屋外型AED収納ボックス  
型番:AED300KZ

電源レスだから、  
設置場所が増える!  
設置費用が安価に!



電源レス  
自立式屋外型AED収納ボックス  
型番:AED300KBZ


# 仕様

注1 デザイン、仕様により寸法が変更になる場合があります。  
 注2 低温時のAED保管温度は日中の気温や日射量、その他気象条件により変動します。  
 注3 41℃：2017年8月現在での国内最高気温、3.31MJ/m<sup>2</sup>：沖縄多照年の最高日射量です。

	AED300KZ	AED300KBZ
タイプ	壁掛式	自立式
価格(税別)	¥128,000	¥198,000
寸法(単位:mm) ※突起部を除く (注1)	ボックス部分：H630 W530 D340	ボックス部分：H630 W530 D340 スタンド部分：H700 W530 D340 土台部分：H50 W530 D530
質量	21kg以下	55kg以下
AC100V電源	不要	不要
塗装仕上	本体：スチール製 下地：カチオン電着塗装 表面：粉体焼付塗装	本体：スチール製 下地：カチオン電着塗装 表面：粉体焼付塗装
AED保管温度 ※ボックス内AED周辺温度 (低温)	0℃以上 ※外気温が2晩続けて-5℃を下回らない場合(注2) -5℃以上 ※外気温が2晩続けて-10℃を下回らない場合(注2)	0℃以上 ※外気温が2晩続けて-5℃を下回らない場合(注2) -5℃以上 ※外気温が2晩続けて-10℃を下回らない場合(注2)
AED保管温度 ※ボックス内AED周辺温度 (高温)	50℃以下 ※外気温が41℃未満、かつ日中の最高日射量が 3.31MJ/m <sup>2</sup> 未満の場合(注3)	50℃以下 ※外気温が41℃未満、かつ日中の最高日射量が 3.31MJ/m <sup>2</sup> 未満の場合(注3)
警告ブザー	扉開時：ブザー鳴動 扉閉時：ブザー停止 ブザー音量：100dB (単4電池2本使用)	扉開時：ブザー鳴動 扉閉時：ブザー停止 ブザー音量：100dB (単4電池2本使用)
固定方法	壁面アンカーボルト固定	床面アンカーボルト固定
防水防塵性能	IP44級	IP44級


## 試験データ・資料

-10℃低温試験

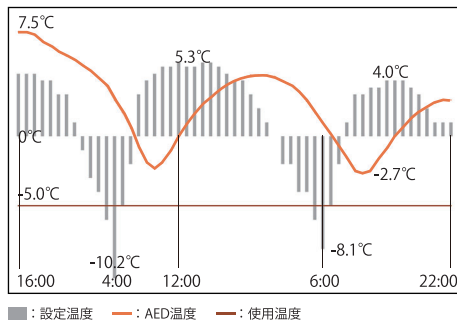


**-10℃低温試験**  
 (1984/02/18~20 栃木県佐野の最高最低気温を元に  
 温度を想定)  
 試験日：平成30年2月16日~19日  
 試験場所：板橋産業技術支援センター

-5℃低温試験

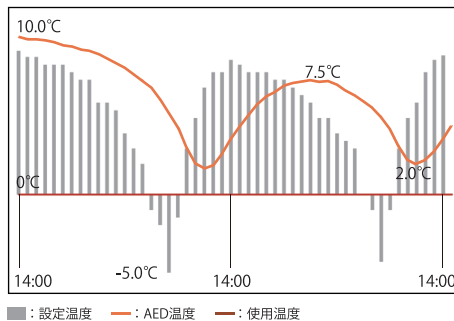

**-5℃低温試験**  
 (2011/01/25~27 山梨県甲府市の最高最低気温を元に  
 温度を想定)  
 試験日：平成30年3月2日~5日  
 試験場所：板橋産業技術支援センター

50℃高温試験

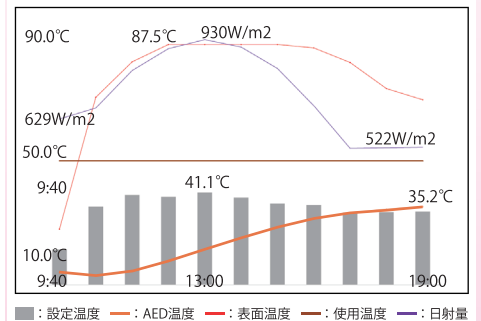

**50℃高温試験**  
 (1991/07/04沖縄県伊是名の日射量、  
 2013/08/12高知県江川崎の最高最低気温を元に温度を想定)  
 試験日：平成30年1月16日

### 防水試験 IPX4：

あらゆる方向からの飛沫から製品を守る「防沫形」等級をクリアしています。  
 ※散水装置を用いて、各散水口あたり約10L/minの水量であらゆる確度から製品に8分間の  
 散水を行い、浸水がないことを確認しています。

### 防塵試験 IP4X

直径1mm以下の異物侵入から製品を守る防塵等級をクリアしています。  
 ※直径1.0mmの試験棒を用いて製品内部に侵入しないことを確認しています。

企画・製造

**ID 飯田電子設計株式会社** <https://i-da.co.jp>

本社 〒174-0046  
 東京都板橋区蓮根1-8-23  
 TEL：03-3968-4455 FAX：03-3968-4420  
 mail: info@i-da.co.jp

福島工場 〒966-0902  
 福島県喜多方市松山町村松字上原2483-5  
 TEL：0241-23-1925 FAX：0241-24-2419

● お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ